

# WIPEX® WET DESI

## Wiederbefüllbarer Feuchttuchspender

Das Profisystem für Flächendesinfektion.

- ▶ Das Feuchttuchsystem WIPEX® WET Desi wurde speziell für die Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und ähnlich hygienisch sensiblen Bereichen entwickelt.
- ▶ Als Einmalsystem bietet WIPEX® WET Desi nicht zuletzt in hygienischer Hinsicht deutliche Vorteile gegenüber der Mehrfachverwendung von Tüchern, bei denen es durch Wiedereintauchen in die Desinfektionslösung zur Kontamination kommen kann!



1 Handschuhe anziehen 2 Vliestuchrolle einsetzen 3 Desinfektionslösung zugeben 4 Vliestuch durch Deckel führen 5 Etikett beschriften und anbringen

### Einfache und sichere Handhabung:

Die Handhabung ist bequem und sicher - einfach den praktischen wiederverwendbaren Feuchttuchspender mit dem Desinfektionsmittel Ihrer Wahl und der perforierten Vliestuchrolle befüllen. Nach ca. 10 Minuten hat die Rolle die Lösung vollständig aufgenommen und das System ist einsatzbereit. Die leistungsstarken Vliestücher (100% PET-Fasern) saugen das Desinfektionsmittel perfekt auf und geben es dann gleichmäßig wieder ab - für eine optimale Flächenbenetzung.

### Die praktischen Feuchttuchspender:

Die Feuchttuchspender des WIPEX® WET Desi-Systems sind wiederverwendbar, strapazierfähig (PP-Kunststoff, FDA-Zulassung), spülmaschinenfest und hitzebeständig bis 90°C.

Der clevere Drehverschluss und die verschließbare Entnahmeöffnung verhindern das Verdampfen der Lösung und das Austrocknen der Tücher.

**Haltbarkeit einer Füllung ca. 4 Wochen - kein tägliches Ansetzen der Lösung mehr!**

# WIPEX® WET DESI



## 2 Sorten Nachfüllrollen:

Die Nachfüllrollen bestehen zu 100% aus PET-Vliesstoff. Die spezielle Fasermischung sorgt für hervorragende Gebrauchseigenschaften. Die Vliestücher sind absolut lösungsmittelbeständig, fusselfrei und reißfest. Mit jeder Vliesrollenpackung werden Aufkleber mitgeliefert, damit die Spender mit Fülldatum, Inhaltsstoffen und Chargenangaben beschriftet werden können.

### **WIPEX® WET Desi basic**

**Art.-Nr. 229940**

Vliesrolle weiß  
40g/m<sup>2</sup> - gelochte Tuchstruktur  
Verp. 6 Rollen à 90 Tücher  
(20 x 38 cm) im Folienpack  
Pal. = 80 Verp.

### **WIPEX® WET Desi premium**

**Art.-Nr. 229960**

Vliesrolle weiß  
60g/m<sup>2</sup> - geschlossene Tuchstruktur  
Verp. 6 x 1 Rolle (unterverpackt)  
à 90 Tücher (20 x 38 cm) im Karton  
Pal. = 42 Verp.






## Warum 100% PET-Fasern?

Für die Materialwahl von 100% PET-Fasern (Polyethylenterephthalat) bei den im WIPEX® WET Desi-System eingesetzten Vliestüchern gibt es gute Gründe. Kein vergleichbares Tuch hat bezüglich der Aufnahme und Abgabe der Desinfektionsflüssigkeit so viele Vorteile. Nach der Befüllung des Feuchttuchspenders saugt sich die Vliesrolle schnell und stark voll. Anschließend verteilen die praktischen Einmaltücher die aufgenommene Flüssigkeit besonders gut und gleichmäßig - für eine Flächendesinfektion mit gleichbleibend einwandfreier Qualität.

Auch bei den möglichen Wechselwirkungen zwischen Desinfektionslösung und Vliestuch konnte die reine Kunstfaser PET überzeugen - z.B. beim sogenannten Adsorptionsverhalten. Unter Adsorption versteht man die Anlagerung von Molekülen des Desinfektionsmittels an Fasern des Tuches. Dies ist so weit wie möglich zu vermeiden, da die so gebundene Wirksubstanz nicht mehr optimal abgegeben wird. Auch hier haben vergleichbare Untersuchungen PET eindeutig im Vorteil gesehen.

**Auswahl von 5 Farben** bei den Entnahmeöffnungen, zur sicheren Produktunterscheidung und problemlosen Zuordnung der Anwendungsbereiche.

**WIPEX® WET Desi** Feuchttuchspender Verp. 1 Stck.

-  Entnahmeöffnung weiß: Art.-Nr. 999911
-  Entnahmeöffnung blau: Art.-Nr. 999912
-  Entnahmeöffnung rot: Art.-Nr. 999913
-  Entnahmeöffnung grün: Art.-Nr. 999914
-  Entnahmeöffnung gelb: Art.-Nr. 999915



**NORDVLIES GmbH**  
Am Redder 7  
D-22941 Bargtheide

Telefon: +(0) 4532 5050-0  
Telefax: +(0) 4532 5050-40  
E-Mail: [info@nordvlies.de](mailto:info@nordvlies.de)

[www.nordvlies.de](http://www.nordvlies.de)